

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Основная общеобразовательная школа № 5»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Школа № 5»

Адамбаева Л.А.
2022г.

«14» 02 2022г.



ИНСТРУКЦИЯ
по утилизации использованных одноразовых/многоцветных
медицинских масок и перчаток

Инструкция разработана для всех сотрудников и посетителей МБОУ «Школа № 5» с целью соблюдения правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на предмет соблюдения масочного режима в образовательной организации.

После 2-3 часов использования одноразовую медицинскую маску необходимо утилизировать:

1. аккуратно взять за ушные крепления и потянуть, не касаясь передней части маски;
2. снять маску, стараясь не задеть использованным изделием лицо;
3. свернуть маску наружной стороной внутрь;
4. сразу положить одноразовую маску в полиэтиленовый пакет и плотно его завязать;
5. поместить пакет в мусорный контейнер, а руки тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком, уничтожающим вирусы и бактерии;
6. перед использованием нового комплекта средств индивидуальной защиты тщательно вымыть лицо с мылом, если это возможно.
7. при использовании медицинской маски ее нельзя опускать на шею, так как это увеличивает риск заражения коронавирусом.

Аналогичным образом утилизируются защитные медицинские перчатки: перчатки снимают и помещают в полиэтиленовый пакет, и, закрыв его герметично, выбрасывают в специально оборудованный контейнер.

В случае использования сотрудником или посетителем многоцветной защитной маски, через каждые 2—3 часа использования ее необходимо заменить на новую (продезинфицированную).

1. Маску снимают, потянув за ушные крепления, после чего упаковывают в герметично закрывающийся пакет.
2. Впоследствии маску обрабатывают в хлорсодержащем растворе, стирают и тщательно проглаживают утюгом.
3. Пакет, в котором временно хранилась использованная многоцветная маска, завязывают герметично и бросают в мусорное ведро или в специально оборудованные контейнеры.

По мере заполнения емкости (контейнера) для использованных масок и перчаток, но не реже двух раз в день, работники клининговой компании, надев одноразовую маску и перчатки заменяют наполненный пакет новым, предварительно протерев емкость дезинфицирующим раствором. Утилизируют как бытовой мусор.